


CEKA PRECI-LINE

INSTALLATIONSANLEITUNG CEKA PRECI-LINE DIGITALBIBLIOTHEK powered by **exocad**

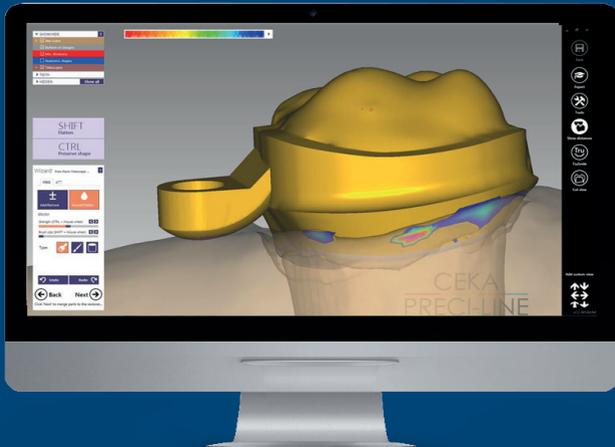

ANLEITUNG ZUR INSTALLATION DER CEKA PRECI-LINE-DIGITALBIBLIOTHEK

Speichern Sie die Bibliothek an einem leicht zugänglichen Ort auf Ihrem PC oder Laptop ab.


SCHRITT 1:

Entpacken Sie die Zip-Datei CKPL DIG LIB.




SCHRITT 2:

Gehen Sie im Ordner *ceka_New Library* zum Ordner *attachments* und kopieren Sie die vollständige **CEKA_PRECI-LINE**-Datei.

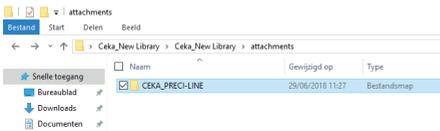


SCHRITT 3:

Gehen Sie nun zur exocad-Speicherstelle **DentalCADApp > library > attachments** und fügen Sie die **CEKA_PRECI-LINE**-Datei ein.

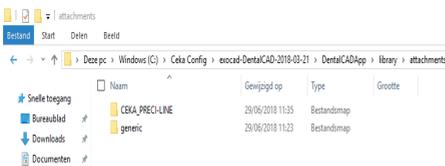


Hinweis: Haben Sie die Speicherstelle vergessen?

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das exocad-Symbol und wählen Sie **Eigenschaften**. Hier finden Sie die Speicherstelle.

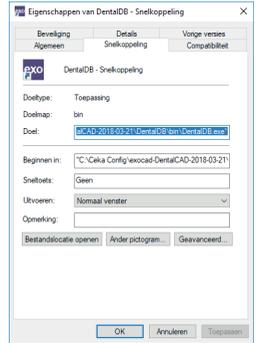


SCHRITT 4:

Gehen Sie im Ordner *ceka_New Library* zum Ordner *bar* und kopieren Sie die einzelnen Dateien.

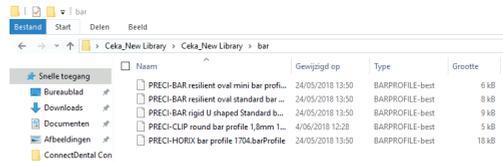

SCHRITT 5:

Gehen Sie nun zur exocad-Speicherstelle **DentalCADApp > library > bar** und fügen Sie die Dateien ein.

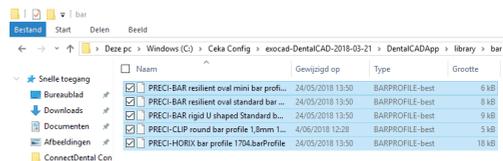

DIE DATEIEN STEHEN JETZT IN DER EXOCAD-SOFTWARE ZUR VERFÜGBAR.

Für nähere Informationen zur
Installation und Konfiguration der
CEKA PRECI-LINE-Digitalbibliothek
kontaktieren Sie bitte info@CKPL.eu.

Wir begrüßen Sie und Ihr Team gerne
für eine produktspezifische Ausbildung
zur Verwendung der CEKA PRECI-LINE-
Digitalbibliothek.

CEKA

PRECI-LINE