

CEKA PRECI-LINE DIGITALE BIBLIOTHEK

INSTALLATIONSANLEITUNG




ANLEITUNG ZUR INSTALLATION DER CEKA PRECI-LINE-DIGITALBIBLIOTHEK

Speichern Sie die Bibliothek an einem leicht zugänglichen Ort auf Ihrem PC oder Laptop ab.


SCHRITT 1:

Entpacken Sie die Zip-Datei **CKPL DIG LIB**.

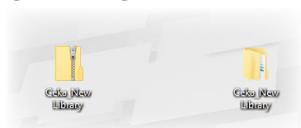


SCHRITT 2:

Gehen Sie im Ordner *ceka_New Library* zum Ordner *attachments* und kopieren Sie die vollständige **CEKA_PRECI-LINE**-Datei.

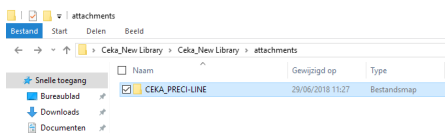


SCHRITT 3:

Gehen Sie nun zur exocad-Speicherstelle **DentalCADApp > library > attachments** und fügen Sie die **CEKA_PRECI-LINE**-Datei ein.

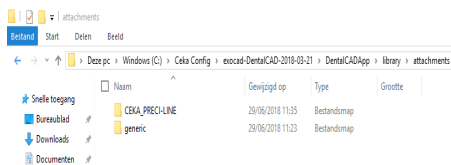


Hinweis: Haben Sie die Speicherstelle vergessen?

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das exocad-Symbol und wählen Sie **Eigenschaften**. Hier finden Sie die Speicherstelle.

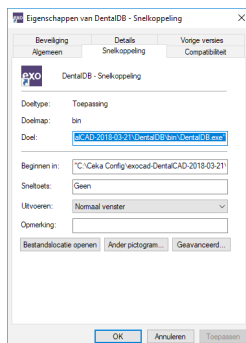

SCHRITT 4:

Gehen Sie im Ordner *ceka_New Library* zum Ordner *bar* und kopieren Sie die einzelnen Dateien.

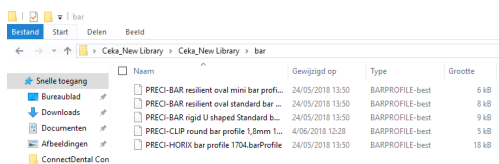

SCHRITT 5:

Gehen Sie nun zur exocad-Speicherstelle **DentalCADApp > library > bar** und fügen Sie die Dateien ein.



DIE DATEIEN STEHEN JETZT IN DER EXOCAD-SOFTWARE ZUR VERFÜGBAR.

Für nähere Informationen zur Installation und Konfiguration der CEKA PRECI-LINE-Digitalbibliothek kontaktieren Sie bitte info@CKPL.eu.

Wir begrüßen Sie und Ihr Team gerne für eine produktspezifische Ausbildung zur Verwendung der CEKA PRECI-LINE-Digitalbibliothek.

CEKA
PRECI-LINE

ALPHADENT NV, Mannebeekstraat 33, 8790 Waregem, Belgium
T +32 56 629 531 - E info@ckpl.eu - www.CKPL.eu