


CEKA PRECI-LINE

GUIDE D'INSTALLATION BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE CEKA PRECI-LINE powered by **exocad**

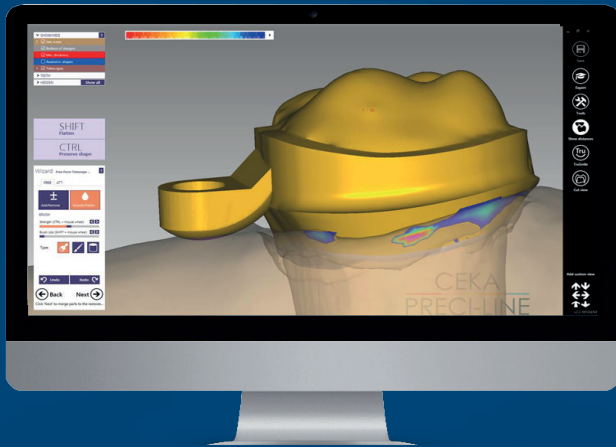

GUIDE POUR L'UTILISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE CEKA PRECI-LINE

Sauvegardez la bibliothèque dans un emplacement accessible à l'utilisateur sur votre PC ou ordinateur portable.


ÉTAPE 1 :

Dézippez le fichier CKPL DIG LIB.




ÉTAPE 2 :

Dans le dossier *ceka_New Library*, allez au dossier *attachments* et copiez le dossier complet **CEKA_PRECI-LINE**.

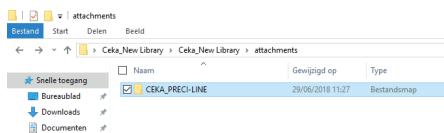


ÉTAPE 3 :

Allez à l'emplacement exocad *DentalCADApp > library > attachments* et collez ici le dossier **CEKA_PRECI-LINE**.

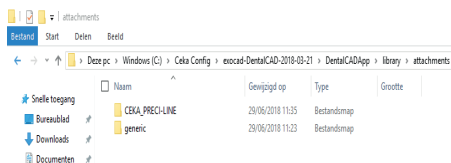


Note : Avez-vous oublié l'emplacement des dossiers ?

Faites un clic droit sur l'icône exocad et allez aux **paramètres** où vous trouverez leur emplacement.

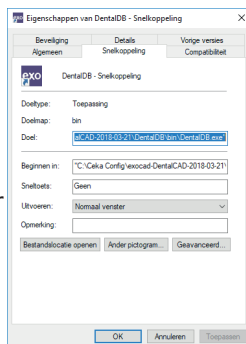


ÉTAPE 4 :

Dans le dossier *ceka_New Library*, allez au dossier *bar* et copiez le contenu.

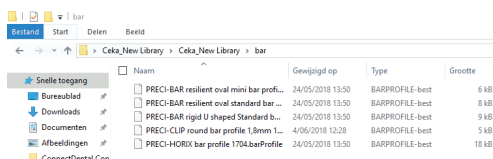

ÉTAPE 5 :

Allez à l'emplacement exocad *DentalCADApp > library > bar* et collez ici les fichiers individuels.

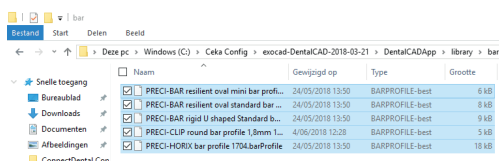

LES FICHIERS SONT MAINTENANT DISPONIBLES DANS LE LOGICIEL EXOCAD.

Pour en savoir plus sur l'installation
et la configuration de la bibliothèque
numérique CEKA PRECI-LINE,
contactez info@CKPL.eu.

Nous vous accueillons avec plaisir,
ainsi que votre équipe, pour une
formation spécifique au produit
sur l'utilisation de la bibliothèque
numérique CEKA PRECI-LINE.

CEKA

PRECI-LINE