


CEKA PRECI-LINE

INSTALLATIEHANDLEIDING CEKA PRECI-LINE DIGITALE BIBLIOTHEEK powered by **exocad**

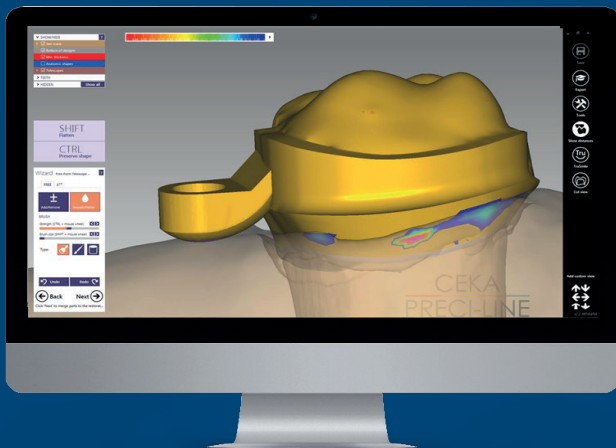

HANDLEIDING VOOR HET INSTALLEREN VAN DE CEKA PRECI-LINE DIGITALE BIBLIOTHEEK

Bewaar de bibliotheek op een gemakkelijk terug te vinden locatie op uw pc of laptop.


STAP 1:

Pak het zip-bestand CKPL DIG LIB uit.




STAP 2:

Ga in de map *ceka_New Library* naar de map *attachments* en kopieer de volledige map **CEKA_PRECI-LINE**.

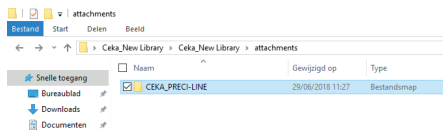


STAP 3:

Ga nu naar de exocad-bestandslocatie **DentalCADApp > library > attachments** en plak hierin de map **CEKA_PRECI-LINE**.

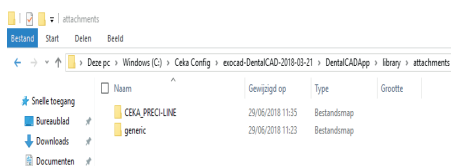


Tip: vergeten waar deze bestanden staan weggeschreven?

Rechtsklik op het exocad-icoon en ga vervolgens naar **eigenschappen**. Daar vindt u de bestandslocatie.

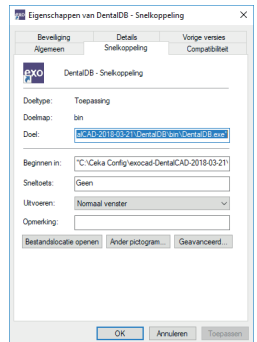


STAP 4:

Ga in de map *ceka_New Library* naar de map *bar* en kopieer de inhoud.

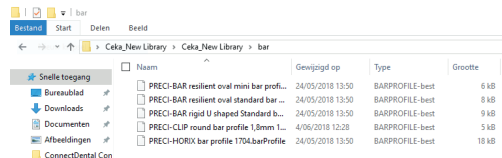

STAP 5:

Ga nu naar de exocad-bestandslocatie **DentalCADApp > library > bar** en plak hierin de bestanden.

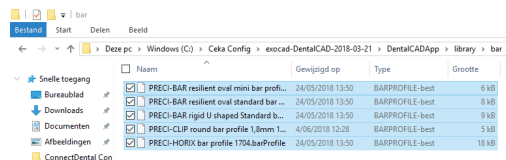

DE BESTANDEN ZIJN NU BESCHIKBAAR
IN DE EXOCAD-SOFTWARE.

Voor meer informatie over het
installeren en configureren van de
CEKA PRECI-LINE digitale bibliotheek,
contacteer info@CKPL.eu.

Wij verwelkomen u en uw team
graag voor een productgerichte
opleiding over het gebruik van de
CEKA PRECI-LINE digitale bibliotheek.

CEKA

PRECI-LINE