

**VERARBEITUNG VON PRECI-BALL
MIT AUSSCHRAUBBARER PATRIZE**

1. Fertigen Sie das Modell an und modellieren die Stiftwurzelkappen (verwenden Sie PRECI-POST). Die Oberfläche der Wachsmodellation soll möglichst niedrig und glatt sein.
2. Fertigen Sie zur Bestimmung der Position des Attachments einen Gipsschlüssel der Wachsaufstellung an.
3. Schrauben Sie den Basisring **RA 0063** auf den Parallelhalter **RE P 4** und setzen Sie ihn im Parallelometer auf die Stiftwurzelkappe. Danach wird er in die Wachsmodellation einmodelliert und mitgegossen. Machen Sie mit einem feinen Instrument eine kleine Rille um den Basisring herum im Wachs, um das Einfließen von Metall zu vermeiden. Kerneinbettung wird empfohlen.
4. Der Basisring ist nur mit Edelmetalllegierungen angussfähig. Beim Verarbeiten von Nichtedelmetalllegierungen müssen Sie den Basisring nach dem Gießen auf die Stiftwurzelkappe löten.
5. Dazu fixieren Sie den Basisring ebenfalls im Parallelometer mit Klebewachs oder Kunststoff an der gegossenen Stiftwurzelkappe und löten Sie ihn anschließend mit Hilfe des Löthilfsteils **RE H 4**. Die Verwendung von **CEKA SOL** wird empfohlen.
6. Schrauben Sie die Patrizie in den Basisring (immer mit dem Schraubenzieher **IMP-XS-042**). Bringen Sie die Matrize und den großen Platzhalter **RA 0055** an. Die Matrize wird nun in die Prothese einpolymerisiert.
7. Sichern Sie das Gewinde mit **CEKA BOND** (siehe INFO 069).

Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfsteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.