

VERARBEITUNG VON PRECI-BAR

Artikelnummern:	1100/H/MR/OR	1100/H/MR/PA	1100/H/MR/IN
	1102/H/MR/OR	1102/H/MR/PA	1102/H/MR/IN
	1103/B/OR	1103/B/PA	1012/B
	1103/BL/OR	1103/BL/PA	
	1101/B/OR	1101/B/PA	1013/B
	1101/BL/OR	1101/BL/PA	
	1100/B/OR	1100/B/PA	1011/B
	1100/BL/OR	1100/BL/PA	

1. Führen Sie nach dem Situationsabdruck bei Stiftwurzelkappen, Kronen bzw. Implantaten die Bissnahme, Zahnaufstellung und Anprobe durch. Fertigen Sie dann einen Schlüssel der Wachsaufstellung aus Gips oder Silikon im Stegbereich an.
2. Passen Sie das Stegprofil an und kleben Sie es auf die Stiftwurzelkappen, Implantatzylindern oder an die Kronen. Betten Sie die Primärkonstruktion in Löteinbettmasse ein und löten Sie. Verwenden Sie bei mehreren Profilsegmenten den Parallelhalter **1102 P/1100 P**.
3. Passen Sie den Reiter an und runden Sie die äußeren Enden ab.
4. Platzieren Sie den Messingplatzhalter, um Resilienz zu erhalten (ovales Profil).
5. Blocken Sie den freien Raum zwischen Stegprofil und Kieferkamm mit Hartgips oder Silikon aus, wobei der Hartgips bzw. das Silikon auslaufend bis auf die Hälfte des Reiters heraufgezogen werden muss. Entfernen Sie den Hartgips bzw. das Silikon nach dem Polymerisieren. Die Lamellen liegen nun frei zum Aktivieren.
6. Bereiten Sie die Wachsaufstellung zum Einbetten vor.
7. Betten Sie ein, arbeiten Sie aus und entfernen Sie den Platzhalter.
8. Reinigen Sie den Reiter und aktivieren Sie ihn (siehe INFO 108).

Bemerkung: bei starren Verankerungen ist die Verarbeitung identisch, es entfällt lediglich die Verwendung des Platzhalters.

Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.

- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfstteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.