

## ERNEUERN EINER PROTHESE MIT PRECI-HORIX

1. Machen Sie eine Situationsabformung. Messen Sie die Länge des Stegprofils im Mund des Patienten.
2. Kürzen Sie den Profilanalog **1707** auf diese Länge und versehen Sie ihn mit Retentionen für das Gipsmodell.
3. Drücken Sie den Profilanalog an die entsprechende Stelle in der Abformung und fertigen Sie ein Hartgipsmodell bzw. ein Epoxymaterialmodell an.
4. Legen Sie die Platzhalter **1703** auf den Profilanalog und blocken Sie den Rest des Steges mit einem festen Material aus (Gips, Silikon oder Zement).
5. Versehen Sie die Platzhalter ggf. mit dem Gehäuse **1706** und stellen Sie die Prothese wie gewohnt fertig.
6. Entfernen Sie die Platzhalter mit einem scharfen Instrument.
7. Drücken Sie die gewünschten Reiter **1802/1805/1806** mit dem mitgelieferten Eindrückstift **1705** an die vorgesehenen Stellen (siehe INFO 016).

### **Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise**

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfstteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.