

UNTERFÜTTERN EINER PROTHESE MIT PRECI-VERTIX

1. Tragen Sie Abformmaterial auf die Basalseite der Prothese auf und machen Sie eine Abformung.
2. Schneiden Sie die Matrizen mit einem scharfen Metallinstrument aus der Prothese.
3. Füllen Sie die Metallmäntel vollständig mit Silikon auf.
4. Fertigen Sie ein Hartgipsmodell an.
5. Unterfüttern Sie wie gewohnt. Verwenden Sie ein Unterfütterungsgerät.
6. Entfernen Sie das Silikon aus den Metallmänteln und drücken Sie neue Matrizen ein (siehe INFO 026).

Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfsteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.