

## **ERNEUERN EINER PROTHESE MIT PRECI-VERTIX**

1. Machen Sie eine Situationsabformung.
2. Legen Sie den Profilanalog **1819** in die Aussparung. Die runde Öffnung dient zur Verankerung im Gips.
3. Drücken Sie die ersetzbare Matrize **1802** über die Patrize. Blocken Sie den untersichgehenden Bereich des Geschiebes leicht konisch mit Wachs aus.
4. Arbeiten Sie wie in INFO 014 oder INFO 015 beschrieben weiter.

### **Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise**

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfstteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.