

**ERNEUERN EINER PROTHESE MIT PRECI-BAR**

Artikelnummern:	<b>1100/H/MR/OR</b>	<b>1100/H/MR/PA</b>	<b>1100/H/MR/IN</b>
	<b>1102/H/MR/OR</b>	<b>1102/H/MR/PA</b>	<b>1102/H/MR/IN</b>
	<b>1103/B/OR</b>	<b>1103/B/PA</b>	<b>1012/B</b>
	<b>1103/BL/OR</b>	<b>1103/BL/PA</b>	
	<b>1101/B/OR</b>	<b>1101/B/PA</b>	<b>1013/B</b>
	<b>1101/BL/OR</b>	<b>1101/BL/PA</b>	
	<b>1100/B/OR</b>	<b>1100/B/PA</b>	<b>1011/B</b>
	<b>1100/BL/OR</b>	<b>1100/BL/PA</b>	

1. Machen Sie eine Situationsabformung.
2. Fertigen Sie ein Hartgipsmodell an. Der gesamte Stegbereich muss aus Epoxymaterial oder Modellierkunststoff hergestellt werden.
3. Kürzen Sie den entsprechenden Reiter auf die erforderliche Länge (dem Steg entsprechend) (**1100/H/MR/OR, 1100/H/MR/PA, 1100/H/MR/IN, 1102/H/MR/OR, 1102/H/MR/PA, 1102/H/MR/IN**).
4. Setzen Sie den Reiter auf das Modell. Wenn Sie einen resilierenden PRECI-BAR verarbeiten, müssen Sie den Platzhalter verwenden.
5. Bereiten Sie die Wachsaufstellung zum Einbetten vor.
6. Isolieren Sie den reproduzierten Steg gegen den Kunststoff. Stellen Sie die Prothese fertig, arbeiten Sie aus und entfernen Sie ggf. den Platzhalter.
7. Reinigen Sie den Reiter und aktivieren Sie ihn wenn nötig (siehe INFO 108).

**Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise**

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfsteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.