

## **ERNEUERN EINER PROTHESE MIT PRECI-CLIP**

1. Füllen Sie den untersichgehenden Bereich des Steges mit Weichwachs auf und machen Sie eine Situationsabformung.
2. Fertigen Sie ein Hartgipsmodell an. Der gesamte Stegbereich muss aus Epoxymaterial oder Modellierkunststoff hergestellt werden.
3. Setzen Sie einen Reiter **1105/1106/1125/1126** mit dem Platzhalter auf das Modell.
4. Blocken Sie den gesamten Stegbereich aus, so dass nur die Reiter 2/3 frei liegen. Beschichten Sie auch die Oberseite des Steges, um Resilienz zu erhalten.
5. Blocken Sie auch den unteren Teil der Reiter aus, so dass sie später aktiviert werden können.
6. Stellen Sie die Prothese wie gewohnt fertig.
7. Entfernen Sie den Platzhalter nach der Polymerisation und aktivieren Sie die Reiter wenn nötig (siehe INFO 107).

### **Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise**

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfstteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.