

## **ERSETZEN EINES REITERS IN EINER PROTHESE MIT PRECI-CLIP**

1. Nehmen Sie den Profilanalog **1707**, trennen Sie ein Stück ab und kürzen Sie es auf die Länge des Reiters (für jeden Reiter). Versehen Sie ihn an der Unterseite mit Retentionen für die Verankerung.
2. Drücken Sie das Profil mit Platzhalter in den Reiter in der Prothese und fertigen Sie ein Hartgipsmodell an.
3. Schleifen Sie den alten Reiter in der Prothese frei und entfernen Sie ihn.
4. Setzen Sie den neuen Reiter **1105/1106/1125/1126** mit Platzhalter auf das Modell und polymerisieren Sie ihn mit Kaltpolymerisat ein.
5. Aktivieren Sie den Reiter nach dem Ausarbeiten wenn nötig (siehe INFO 107).

### **Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise**

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfsteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.