

## **UNTERFÜTTERN EINER PROTHESE MIT PRECI-BALL**

1. Machen Sie eine Abformung in der Prothese. Die Matrizen müssen richtig auf den Patrizen sitzen.
2. Setzen Sie den Modellanalog **1201 D** in die Matrizen in der Prothese.
3. Fertigen Sie ein Hartgipsmodell an.
4. Unterfüttern Sie wie gewohnt. Verwenden Sie ein Unterfütterungsgerät.
5. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Matrize nach dem Ausarbeiten und Polieren wenn nötig (siehe INFO 053).

### **Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise**

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfstteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.