

## **ERNEUERN EINER PROTHESE MIT PRECI-BALL**

1. Machen Sie eine Situationsabformung.
2. Setzen Sie den Modellanalog **1201 D** in die Abformung und fertigen Sie ein Hartgipsmodell an.
3. Füllen Sie den Bereich zwischen Papille und Stiftwurzelkappe mit Gips auf. Legen Sie den großen Platzhalter **RA 0055** über die Patrize auf der Stiftwurzelkappe. Passen Sie ihn an, so dass er 1 bis 1,5 mm über die Papille hinausreicht.
4. Füllen Sie die Matrize bis zur Hälfte mit Silikon und drücken Sie sie über die Patrize. Der PVC-Ring darf nur um die Lamellen der Matrize liegen. Die Retentionszone für Kunststoff auf der Matrize muss frei bleiben.
5. Setzen Sie die Wachsaufstellung auf das Modell. Bereiten Sie sie zum Einbetten vor.
6. Polymerisieren Sie und arbeiten Sie aus.
7. Entfernen Sie den Platzhalter nach der Polymerisation. Entfernen Sie den PVC-Ring nicht.
8. Kontrollieren Sie die Retention und aktivieren Sie die Matrize wenn nötig (siehe INFO 053).

### **Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise**

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfsteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.