

**AKTIVIEREN BZW. DESAKTIVIEREN EINER MATRIZE  
IN EINER PROTHESE MIT PRECI-BALL**

**AKTIVIEREN/ZUSAMMENDRÜCKEN DER MATRIZENLAMELLEN**

Drücken Sie das Aktivierhilfsteil **1220** vorsichtig und schrittweise über die Matrize, bis Sie die gewünschte Retention erhalten.

**DESAKTIVIEREN/SPREIZEN DER MATRIZENLAMELLEN**

Drücken Sie das Desaktivierhilfsteil **1221** vorsichtig und schrittweise über die Matrize, bis Sie die gewünschte Retention erhalten.

**Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise**

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfsteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.