

## **ERSETZEN EINER EINGEKLEBTEN TITANMATRIZE**

1. Identifizieren Sie das Attachment als ein **M2-** oder ein **M3-**Attachment (siehe INFO 062 und INFO 070).
2. Verwenden Sie eine scharfe (neue) Zylinderfräse, um die Matrize herauszuschleifen.
3. Schleifen Sie mit kreisförmigen Bewegungen und führen Sie die Fräse parallel zur Matrizenwand.
4. Wenn das Metall durchgeschliffen wird, erscheint das hellgraue **CEKA SITE**-Komposit. Entfernen Sie auch die **CEKA SITE**-Reste mit dem zylindrischen Diamantbohrer.
5. Beschädigen Sie nicht den oberen Rand des gegossenen Teiles der Stiftwurzelkappe.
6. Die Aussparung in der Stiftwurzelkappe sollte zylindrisch bleiben.
7. Bei **M2-** und **M3-**Attachments werden nun folgende Teile zusammengesetzt:  
**M2: RE H 14** (Hilfsteil) + **RE 0031** (Druckknopf) + **RE 0096** (Platzhalter) + **RE 4500 TI** (Titanmatrize);  
**M3: H 14** (Hilfsteil) + **694 C** (Druckknopf) + **694 B** (Platzhalter) + **694 TI** (Titanmatrize).
8. Kontrollieren Sie mit dieser Kombination, ob die Matrize ganz in die Aussparung gebracht werden kann.
9. Sandstrahlen Sie die Aussparung und die Außenseite der Titanmatrize.
10. Mischen Sie etwas **CEKA SITE** an, geben Sie es in die Aussparung und drücken Sie die Matrize mit den zusammengesetzten Teilen in die Aussparung (siehe INFO 074).
11. Achten Sie darauf, dass diese Teile während der gesamten Aushärtezeit (10 Minuten) nicht bewegt werden.
12. Entfernen Sie die Hilfsteile mit dem Druckknopf und das überschüssige **CEKA SITE**-Komposit.

### **Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise**

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfsteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.

# **Infoblatt**

## **INFO 072.D-ed.G**

Ausgabedatum: 01/03/17 Ersetzt Version vom: 13/05/08

---