

ERSETZEN EINES RETENTIONSTEILS FÜR KUNSTSTOFFVERANKERUNG

1. Identifizieren Sie das zu ersetzende Retentionsteil als ein **M2**- oder **M3**-Retentionsteil anhand des Gewindes oder seines Druckknopfes (siehe INFO 062).
2. Fertigen Sie ein Reparaturmodell und einen Gipsschlüssel des Prothesenteils an, wo das neue Retentionsteil eingearbeitet werden muss.
3. Schleifen Sie je nach der Größe des Retentionsteils eine Aussparung in die Prothese, die dem neuen Retentionsteil entspricht. Falls erforderlich, entfernen Sie einige Zähne.
4. Kombinieren Sie das Retentionsteil mit einem Druckknopf.
5. Komplettieren Sie die Patrize mit dem entsprechenden Platzhalter **RE 0096 (M2)** oder **694 B (M3)** und setzen Sie diese Einheit in die Matrize (verwenden Sie sie Vaseline oder Ausblockpaste).
6. Drücken Sie den Druckknopf in die Matrize und kontrollieren Sie, ob die Prothese richtig repositioniert werden kann.
7. Mischen Sie etwas Autopolymerisat an (teigige Konsistenz), geben Sie es in die Aussparung für das Retentionsteil und platzieren Sie die Prothese im Mund des Patienten.
8. Entfernen Sie nach dem Aushärten den überschüssigen Kunststoff und kontrollieren Sie die Retention der Attachments (siehe INFO 059).
9. Komplettieren Sie die Prothese mit den eventuell entfernten Kunststoffteilen, hochglanzpolieren Sie und sichern Sie die Druckknöpfe mit **CEKA BOND** (siehe INFO 069).

Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfsteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.