

## **ARBEITSDRUCKKNÖPFE**

Um Beschädigungen von Druckknöpfen während der Verarbeitung zu verhindern, gibt es im CEKA-Attachment-System Arbeitsdruckknöpfe mit geringeren Friktions- bzw. Retentionswerten, die während der Verarbeitung der herausnehmbaren Prothese den Originaldruckknopf ersetzen.

Wir bieten 2 verschiedene Arbeitsdruckknöpfe an:

- **RE H 1:** für **REVAX M2**-Druckknöpfe **RE 0031**  
Verwenden Sie den Schraub Schlüssel **RE H 5**.
- **H 1:** für **REVAX M3**-Druckknöpfe **694 C**  
Verwenden Sie den Schraub Schlüssel **RE H 5**.

Die Druckknöpfe sind bereits mit einem Platzhalter versehen.

Ersetzen Sie den Arbeitsdruckknopf am Ende der Verarbeitung wieder durch den Originaldruckknopf (siehe INFO 063). Sichern Sie mit **CEKA BOND** (siehe INFO 069).

**Achtung:** Die Arbeitsdruckknöpfe sind aus edelmetallfreien Legierungen gefertigt. Sie dürfen **nicht im Mund** des Patienten verwendet werden.

### **Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise**

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfsteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.