

VERARBEITUNG EINER PATRIZE VON PRECI-CLIX TI-TI/P-TI

1. Legen Sie die Einschubrichtung der Prothese fest.
2. Wählen Sie den passenden Kunststoffpatrizenhalter **RE 04 TI** und setzen Sie den Parallelhalter **RE P 7** in die Öffnung.
3. Passen Sie das Kunststoffprofil der Form, Position und Höhe der Pfeilerkronen an.
4. Befestigen Sie den Patrizenhalter mit Wachs an den Pfeilerkronen. Entfernen Sie den Parallelhalter und füllen Sie die Öffnung mit Einbettmasse, die mit 100 %-iger Expansionsflüssigkeit angemischt wurde.
5. Bringen Sie die Gusskanäle an den Kronen an und bereiten Sie sie zum Einbetten vor.
6. Betten Sie ein, wärmen Sie vorsichtig vor und gießen Sie in einer harten Legierung. Verwenden Sie keine schnell aufheizbaren (Speed)Einbettmassen.
7. Strahlen Sie das Gussstück ab, ohne die Öffnung für die Patrizze zu beschädigen.
8. Repositionieren Sie das Modell nach der Keramikverblendung und der Anprobe im Parallelometer.
9. Fixieren Sie die TITANAX-Patrizze **1271 C** im Parallelhalter **1201 P** und kontrollieren Sie, ob er richtig in der Aussparung sitzt.
10. Füllen Sie die Öffnung mit ein wenig **CEKA SITE**. Beachten Sie genau die Verarbeitungshinweise.
11. Setzen Sie die Patrizze in die mit **CEKA SITE** gefüllte Öffnung und halten Sie sie 5 bis 10 Minuten fest.
12. Entfernen Sie den Parallelhalter **1201 P** und entfernen Sie das überschüssige **CEKA SITE**-Komposit.

Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfsteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.