

ERSETZEN EINER PRECI-CLIX-MATRIZE

In allen PRECI-CLIX-Packungen werden die gelben Matrizen **1231** standard mitgeliefert.

Entspricht die Retention der Matrizen nicht den Anforderungen, so können sie durch die weißen Matrizen **1232** mit schwächerer Retention oder durch die roten Matrizen **1233** mit stärkerer Retention ersetzt werden.

1. Biegen Sie die Matrizenlippen mit einem spitzen Instrument (angespitztem Bohrer) nach innen.
2. Nehmen Sie ein Instrument, das in das Gehäuse passt und erhitzen Sie es. Entfernen Sie die Matrize mit einem spitzen Instrument.
3. Setzen Sie die gewünschte Matrize auf den Eindrückstift **1222** und drücken Sie sie in das Gehäuse.
4. Kontrollieren Sie, ob die gewünschte Retention erreicht wurde.

Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfsteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.