

## VERARBEITUNG VON PRECI-SAGIX V MIT KONISCHEM PROFIL IMP-CK-014

1. Biegen Sie das PLASTICWAX-Profil **IMP-CK-014** im lauwarmen Wasser.  
Achtung: Die Bereiche, wo die Patrizie angebracht wird, dürfen nicht gebogen werden (Kontaktfläche zur Matrize).
2. Härten Sie das Profil im kalten Wasser aus.
3. Kürzen Sie das Profil auf die entsprechende Länge mit einem heißen Instrument.
4. Befestigen Sie das Profil mit PLASTICWAX-Wachs **IMP-CK-045** zwischen den Implantatzylindern.
5. Machen Sie mit einer Fräse bzw. einem Ausblockgerät eine gerade Aussparung im Steg, wo nachher die Patrizie angebracht wird.
6. Komplettieren Sie die schraubbare Patrizie **1373** (Standard  $\varnothing$  2,2 mm) mit dem IRAX-Basisring **RA 0063** (Edelmetalllegierungen) bzw. dem NOPRAX-Basisring **RA 0064** (NEM-Legierungen). Verwenden Sie dafür den Schraubenzieher **IMP-XS-042**.
7. Setzen Sie das Ganze mit dem Parallelhalter **1300 P** an die Wachsmodellation. Das kugelförmige Patrizienteil passt in das gewellte Teil des Parallelhalters.
8. Schrauben Sie nach der Wachsmodellation die Patrizie mit dem Schraubenzieher **IMP-XS-042** aus dem Basisring.
9. Legen Sie das Modell und den Steg in lauwarmes Wasser, um Spannungen in der Konstruktion zu vermeiden und lassen Sie das Ganze abkühlen. Schrauben Sie den Steg zum Einbetten aus.
10. Betten Sie mit Kerneinbettmasse ein und füllen Sie das Innengewinde des Basisringes völlig mit Einbettmasse auf.
11. Gießen Sie den Steg und betten Sie aus.
12. Vermeiden Sie beim Sandstrahlen, dass das Innengewinde des Basisringes beschädigt wird. Sandstrahlen Sie diesen Bereich daher nur mit Glanzperlen und unter niedrigem Druck.
13. Arbeiten Sie das Ganze aus und polieren Sie.
14. Schrauben Sie die Patrizie **1373** mit dem Schraubenzieher **IMP-XS-042** in den Basisring.
15. Arbeiten Sie weiter wie in INFO 141 beschrieben.

### Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.

- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfstteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.