

ERNEUERN EINER PROTHESE MIT PRECI-SAGIX

1. Bestimmen Sie anhand des Patrizendurchmessers, um welches Attachment es geht:
Mini = 1,7 mm, Standard = 2,2 mm.
2. Machen Sie eine Situationsabformung.
3. Bringen Sie den Patrizenanalogue **1331** (Mini \varnothing 1,7 mm) bzw. **1381** (Standard \varnothing 2,2 mm) im Patrizenbereich in die Abformung an und fertigen Sie ein Gipsmodell an.
4. Setzen Sie das rosa Dublierhilfsteil **1316** (Mini \varnothing 1,7 mm) bzw. **1366** (Standard \varnothing 2,2 mm) über den Analogue. Blocken Sie den unterschgehenden Bereich des Dublierhilfsteils leicht konisch aus. Parallelisieren die die Dublierhilfsteile.
5. Fertigen Sie den Modellguss an. Die Dublierhilfsteile sollen genau reproduziert sein.
6. Fertigen Sie die Wachsmodellation der herkömmlichen Konstruktion an und gießen Sie, ohne die Replika des Dublierhilfsteils zu beschädigen.
7. Sandstrahlen Sie nach dem Ausbetten vorsichtig mit Glanzperlen, ohne die Aussparung für die Matrize zu beschädigen. Polieren Sie den Zugang auf Hochglanz.
8. Füllen Sie die Aussparung für die Matrize zum elektrolytischen Glänzen mit Wachs auf.
9. Drücken Sie mit dem universellen Eindrückstift **1323** eine Matrize **1311** (Mini \varnothing 1,7 mm) bzw. **1361** (Standard \varnothing 2,2 mm) in die Aussparung.
10. Kontrollieren Sie die Retention und ersetzen Sie die Matrize ggf. durch eine weiße Matrize **1312** (Mini \varnothing 1,7 mm) bzw. **1362** (Standard \varnothing 2,2 mm) mit reduzierter Retention oder eine rote Matrize **1313** (Mini \varnothing 1,7 mm) bzw. **1363** (Standard \varnothing 2,2 mm) mit stärkerer Retention.

Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfsteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.