

ERSETZEN EINER PATRIZE VON PRECI-52

1. Schrauben Sie den inneren Teil der Patrize **1563** (U - Mini \varnothing 3,15 mm) bzw. **1568** (S - Standard \varnothing 3,40 mm) mit dem sternenförmigen Schraubenzieher **1570** heraus.
2. Schrauben Sie einen neuen inneren Teil der Patrize **1563** (U - Mini \varnothing 3,15 mm) bzw. **1568** (S - Standard \varnothing 3,40 mm) mit dem sternenförmigen Schraubenzieher **1570** in das Patrizengehäuse.

Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfsteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.