

ÉLABORATION DU PRECI-BALL AVK

1. Modelez les coiffes à tenon radulaire et soudez la partie mâle **1203 C** (voir INFO 048, points 1 à 8).
2. Vissez la partie femelle **1207 A** dans l'anneau de rétention **694 AKS2** (toujours à l'aide du tournevis **IMP-XS-042**) et placez la partie femelle sur la partie mâle.
3. Positionnez la grande cale d'épaisseur **RA 0055**.
4. Polymérisez la partie femelle dans la prothèse.
5. Ajustez la rétention correcte de la prothèse après la finition (voir INFO 053).

Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.