

## **REBASAGE D'UNE PROTHÈSE AVEC PRECI-HORIX**

1. Prenez une empreinte avec les cavaliers dans la prothèse.
2. Enlevez les cavaliers et remplissez cette cavité avec du plâtre et d'isolant.
3. Coulez un modèle et enlevez le matériau d'empreinte. L'utilisation d'un appareil de rebasage ou d'un moufle est conseillée.
4. Préparez le rebasage comme d'habitude.
5. Après la finition, enclenchez de nouveaux cavaliers dans la prothèse.

### **Effets secondaires, avertissements et précautions**

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.