

ÉLABORATION DES PROFILS PLASTIQUES PRECI-BAR

1. Prenez une empreinte de la situation en bouche. Modelez les couronnes ou coiffes à tenon radiculaire ou placez sur les analogues d'implants les cylindres calcinables ou pour coulée de raccord.
2. Coupez le profil plastique à la longueur nécessaire et positionnez-le avec la tige de paralléliseur **1100 P/1102 P** entre les coiffes à tenon radiculaire, les couronnes ou les cylindres.
Si vous posez sur le profil une tige de coulée supplémentaire ou un événement, faites-le du côté basal de la barre.
Coulez la construction dans un alliage dur.
Terminez et polissez après la coulée comme d'habitude. Veillez à ne pas enlever trop de métal.
Posez après finition et polissage de la construction coulée les cavaliers respectifs, éliminez les zones rétentives et polymérisez-les dans la prothèse.
Ajustez la rétention après la finition de la prothèse (voir INFO 108).

Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.