

## **REPLACER UNE PARTIE FEMELLE PRECI-VERTIX**

Tous les emballages PRECI-VERTIX standard **1801** en **1811** sont livrés avec des parties femelles jaunes **1802**.

Si la friction de ces parties femelles ne donne pas entière satisfaction, elles peuvent être remplacées par des parties femelles blanches **1805** avec une friction réduite ou par des parties femelles rouges **1806** avec friction accrue.

1. Coupez la partie femelle avec un bistouri au milieu et enlevez-la de la prothèse.
2. Placez la partie femelle désirée sur l'auxiliaire d'insertion **1804** et positionnez-la en place.
3. Contrôlez si la friction désirée est obtenue.

### **Effets secondaires, avertissements et précautions**

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.