

UTILISATION DU PROFIL PLASTICWAX

- Le profil PLASTICWAX permet un modelage rapide et précis d'une connexion de barre.
- Le profil PLASTICWAX est fait d'un mélange de cire et de résine.
- Le profil PLASTICWAX est calcinable sans résidu.
- Le profil PLASTICWAX peut être ajusté en conservant tous les détails du profil.

- Le profil PLASTICWAX est livrable comme suit:

1. profil conique (8°, longueur: 60 mm) Comme profil connecteur	IMP-CK-014	4 pièces/emballage
2. profil rond (Ø 1,8 mm, longueur: 60 mm) Pour utilisation avec les cavaliers PRECI-CLIP 1105 et 1106	1108/B	4 pièces/emballage
3. profil PRECI-HORIX (Ø 1,8 mm, hauteur: 4 mm, longueur: 60 mm) Pour utilisation avec les cavaliers plastiques PRECI-HORIX 1802 et les cavaliers PRECI-CLIP 1105 et 1106	1734	4 pièces/emballage
4. profil en forme de U PRECI-BAR STANDARD (Ø 2,2 mm, hauteur: 3 mm, longueur: 60 mm) Pour utilisation avec les cavaliers PRECI-BAR 1100/H/MR/OR et 1100/H/MR/IN	1001/B	4 pièces/emballage
5. profil ovale PRECI-BAR MINI (Ø 1,6 mm, hauteur: 2,3 mm, longueur: 60 mm) Pour utilisation avec les cavaliers PRECI-BAR 1102/H/MR/OR et 1102/H/MR/IN	1002/B	4 pièces/emballage

1. Après immersion dans l'eau, ajustez le profil sur le modèle. Remarque: veillez à ne pas déformer le profil à l'emplacement des cavaliers!
2. Durcissez le profil dans l'eau froide.
3. Coupez le profil à la longueur désirée avec un bistouri chauffé.
4. Fixez à la cire le profil dans le modelage.

Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.