

REFAIRE UNE PROTHÈSE AVEC PRECI-VERTIX

1. Prenez une empreinte de la situation en bouche.
2. Placez l'analogue de profil **1819** dans la cavité. L'ouverture ronde sert à l'ancrage dans le plâtre.
3. Glissez la partie femelle interchangeable **1802** sur la partie mâle. Éliminez les zones rétentives en dessous de la glissière avec de la cire de façon légèrement conique.
4. Procédez comme décrit dans INFO 014 ou INFO 015.

Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.