

## REFAIRE UNE PROTHÈSE AVEC PRECI-BAR

Numéros d'article:	<b>1100/H/MR/OR</b>	<b>1100/H/MR/PA</b>	<b>1100/H/MR/IN</b>
	<b>1102/H/MR/OR</b>	<b>1102/H/MR/PA</b>	<b>1102/H/MR/IN</b>
	<b>1103/B/OR</b>	<b>1103/B/PA</b>	<b>1012/B</b>
	<b>1103/BL/OR</b>	<b>1103/BL/PA</b>	
	<b>1101/B/OR</b>	<b>1101/B/PA</b>	<b>1013/B</b>
	<b>1101/BL/OR</b>	<b>1101/BL/PA</b>	
	<b>1100/B/OR</b>	<b>1100/B/PA</b>	<b>1011/B</b>
	<b>1100/BL/OR</b>	<b>1100/BL/PA</b>	

1. Prenez une empreinte de la situation en bouche.
2. Coulez un modèle en résine epoxy ou remplissez l'empreinte à la hauteur de la barre avec de la résine à modeler et coulez un modèle en plâtre dur.
3. Coupez un cavalier correspondant à la longueur nécessaire pour la barre (**1100/H/MR/OR**, **1100/H/MR/PA**, **1100/H/MR/IN**, **1102/H/MR/OR**, **1102/H/MR/PA**, **1102/H/MR/IN**).
4. Placez un cavalier sur le modèle. Utilisez une cale d'épaisseur, si vous travaillez avec un PRECI-BAR dynamique.
5. Préparez l'essai esthétique pour la mise en revêtement.
6. Isolez bien la reproduction de la barre contre la résine, terminez et enlevez la cale d'épaisseur si nécessaire.
7. Nettoyez le cavalier et activez-le si nécessaire (voir INFO 108).

### Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.