

REBASAGE D'UNE PROTHÈSE AVEC PRECI-BAR

| | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Numéros d'article: | 1100/H/MR/OR | 1100/H/MR/PA | 1100/H/MR/IN |
| | 1102/H/MR/OR | 1102/H/MR/PA | 1102/H/MR/IN |
| | 1103/B/OR | 1103/B/PA | 1012/B |
| | 1103/BL/OR | 1103/BL/PA | |
| | 1101/B/OR | 1101/B/PA | 1013/B |
| | 1101/BL/OR | 1101/BL/PA | |
| | 1100/B/OR | 1100/B/PA | 1011/B |
| | 1100/BL/OR | 1100/BL/PA | |

1. Prenez une empreinte avec le cavalier en place.
2. Remplissez le cavalier de silicone.
3. Coulez un modèle en plâtre dur. Utilisez toujours un appareil de rebasage.
4. Faites le rebasage comme d'habitude.
5. Terminez et polissez.
6. Activez le cavalier si nécessaire (voir INFO 108).

Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.