

ÉLABORATION DU PRECI-BALL

1. Déterminez l'axe d'insertion de la prothèse.
2. Modelez les coiffes à tenon radiculaire. Les faces supérieures doivent être modelées de telle façon qu'elles forment un angle droit par rapport à l'axe d'insertion (parallèles au plan d'occlusion).
3. Mettez en revêtement et coulez. Finissez jusqu'à obtenir une surface lisse.
4. Placez la partie mâle à l'aide de la tige de paralléliseur **1201 P** sur la coiffe à tenon radiculaire et collez-le avec une cire dure ou de la résine à modeler.
5. Mettez en revêtement de façon horizontale et soudez (l'utilisation de **CEKA SOL FILIGRAN** (jaune) ou de **CEKA SOL W** (blanc) est conseillée).
6. Repositionnez les coiffes à tenon radiculaire sur le modèle.
7. Comblez l'espace entre la papille et la coiffe à tenon radiculaire de plâtre.
8. Placez la cale d'épaisseur **RA 0055** au-dessus de la partie mâle sur la coiffe à tenon radiculaire. Adaptez-la de telle façon qu'elle s'étende de 1 à 1,5 mm au-dessus de la papille.
9. Remplissez la partie femelle **1201 A/1205 A** à moitié de silicone et pressez-la sur la partie mâle. La bague P.V.C. ne peut se trouver qu'autour des lamelles de la partie femelle. Le plateau de rétention de la partie femelle doit rester libre.
10. Posez l'essai esthétique sur le modèle. Préparez tout pour mettre en moufle.
11. Terminez comme d'habitude.
12. Enlevez la cale d'épaisseur en étain après la polymérisation. N'enlevez pas la bague P.V.C. (celle-ci empêche que des aliments se logent entre la prothèse et la partie femelle).
13. Contrôlez la rétention et activez la partie femelle si nécessaire (voir INFO 053).

Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.