

REEMPLACER UN CAVALIER DANS UNE PROTHÈSE AVEC PRECI-CLIP

1. Prenez un analogue de profil **1707**, coupez-le à la longueur d'un cavalier et créez des rétentions pour le plâtre du côté basal.
2. Insérez le profil avec une cale d'épaisseur dans le cavalier de la prothèse et coulez un modèle en plâtre dur.
3. Meulez l'ancien cavalier de la prothèse et enlevez-le.
4. Placez un nouveau cavalier **1105/1106** avec une cale d'épaisseur sur le modèle et fixez-le avec de la résine autopolymérisante.
5. Activez le cavalier éventuellement après la finition (voir INFO 107).

Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.