

**ACTIVER/DESACTIVER UNE PARTIE FEMELLE
DANS UNE PROTHÈSE AVEC PRECI-BALL**

ACTIVER/RESSERRER LES LAMELLES DE LA PARTIE FEMELLE

Poussez l'instrument d'activation **1220** avec précaution et graduellement autour de la partie femelle, jusqu'à obtenir la rétention désirée.

DESACTIVER/ECARTER LES LAMELLES DE LA PARTIE FEMELLE

Poussez l'instrument de désactivation **1221** avec précaution et graduellement autour de la partie femelle, jusqu'à obtenir la rétention désirée.

Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.