

**REEMPLACER UNE PARTIE FEMELLE
DANS UNE PROTHÈSE AVEC PRECI-BALL**

1. Placez l'analogue de modèle **1201 D** dans la partie femelle à remplacer dans la prothèse.
2. Coulez un modèle en plâtre dur.
3. Enlevez la partie femelle en la meulant et créez suffisamment d'espace. Faites une ouverture dans la prothèse vers le côté lingual.
4. Remplissez la nouvelle partie femelle **1201 A** ou **1205 A + 694 AKS2** à moitié de silicone et placez-la sur l'analogue de modèle. N'oubliez pas la cale d'épaisseur. La bague P.V.C. ne peut se trouver qu'autour des lamelles de la partie femelle. Le plateau de rétention de la partie femelle doit rester libre.
5. Posez la prothèse sur le modèle et laissez couler de la résine autopolymérisante dans l'ouverture.
6. Terminez comme d'habitude.
7. N'enlevez pas la bague P.V.C.
8. Contrôlez la rétention et activez la partie femelle si nécessaire (voir INFO 053).

Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.