

REFAIRE UNE PROTHÈSE AXIALE

Pour des adaptations à la construction primaire ou lors de problèmes avec la construction secondaire, il peut être nécessaire de refaire une prothèse. Suivez méticuleusement la procédure ci-dessous pour une bonne réussite.

CABINET DENTAIRE

1. Dévissez le bouton-pression de la bouche à l'aide de l'auxiliaire **A 1**.
2. Vissez l'auxiliaire d'empreinte **RE H 2 (M2)** ou **H 2 (M3)** dans l'anneau de base en bouche du patient.
3. Prenez une empreinte de l'arcade complète, avec un porte-empreinte individuel.
4. Retirez l'auxiliaire d'empreinte et protégez le filetage de l'anneau de base en bouche pour la suite de l'intervention.

LABORATOIRE

1. Complétez l'auxiliaire d'empreinte **noir** avec l'analogue de modèle **RE H 14 (M2)** ou **H 14 (M3) (couleur métallique)**.
2. Placez cette combinaison dans l'empreinte avec l'**auxiliaire noir** dans le **matériau d'empreinte** et coulez un modèle en plâtre dur. L'auxiliaire de **couleur métallique** sera ainsi inclus dans le **modèle en plâtre**.
3. Remplacez l'auxiliaire d'empreinte par le bouton-pression, complétez-le avec la cale d'épaisseur et enclenchez la nouvelle partie femelle.

Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.