

REFAIRE UNE PROTHÈSE AVEC PARTIE FEMELLE SCELLÉE

Pour des adaptations à la construction primaire ou lors de problèmes avec la construction secondaire, il peut être nécessaire de refaire une prothèse.

CABINET DENTAIRE

1. Complétez l'auxiliaire d'empreinte **RE H 14 (M2)** ou **H 14 (M3)** avec le bouton-pression **RE 0031 (M2)** ou **694 C (M3)**.
2. Placez cette combinaison avec la cale d'épaisseur dans la partie femelle en bouche.
3. Cette combinaison doit être immobile dans la partie femelle. Activez le bouton-pression si nécessaire (voir INFO 059).
4. Éliminez les rétentions éventuelles en-dessous de la partie femelle avec de la cire molle.
5. Prenez une empreinte de l'arcade complète avec un porte-empreinte individuel.

LABORATOIRE

1. Complétez l'auxiliaire d'empreinte combiné mentionné ci-dessus avec le bouton-pression, la cale d'épaisseur et l'analogue de partie femelle **RE H 13 (M2)** ou **H 13 (M3)**.
2. Placez cette combinaison dans l'empreinte.
3. Coulez un modèle de travail dans lequel se trouveront les analogues.
4. Faites une nouvelle construction secondaire.

Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.