

SCELLEMENT D'UNE CONSTRUCTION COMBINÉE

La procédure et la précision durant le scellement d'une construction primaire sont d'une importance primordiale. C'est la garantie pour préserver le parallélisme et ainsi la longévité d'une construction combinée.

1. Contrôlez la bonne adaptation de toutes les pièces séparément et ensuite ensemble en bouche.
2. Déposez une petite quantité de vaseline sur les cales d'épaisseur et placez-les sur les boutons-pression.
3. Scellez la construction primaire.
4. Positionnez la prothèse amovible en place et amenez le patient manuellement en relation centrée.
5. Laissez le ciment complètement durcir.
6. Enlevez la construction secondaire et tous les restes de ciment des pièces primaires ou de la construction secondaire.
7. Contrôlez l'enclenchement et la rétention des boutons-pression (voir INFO 059).

Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.