

**REFAIRE UNE PROTHÈSE M2  
AVEC PARTIES FEMELLES ENDOMMAGÉES**

Si la prothèse doit être refaite en cas d'une construction primaire avec des parties femelles endommagées, la procédure ci-dessous doit être suivie.

**CABINET DENTAIRE**

1. Complétez l'auxiliaire d'empreinte **RE H 14** avec le bouton-pression surdimensionné **RE 0031/195**.
2. Placez cette combinaison dans la partie femelle en bouche du patient avec une cale d'épaisseur **RE 0096**.
3. Cette combinaison doit être immobile dans la partie femelle. Activez le bouton-pression si nécessaire (voir INFO 059).
4. Éliminez les rétentions éventuelles en dessous de la partie femelle avec de la cire molle.
5. Prenez une empreinte de l'arcade complète avec un porte-empreinte individuel.

**LABORATOIRE**

1. Complétez l'auxiliaire d'empreinte combiné **RE H 14** avec un bouton-pression normal **RE 0031**, une cale d'épaisseur **RE 0096** et l'analogue de partie femelle **RE H 13**.
2. Placez cette combinaison dans l'empreinte.
3. Coulez un modèle de travail dans lequel se trouveront les analogues.

4. Utilisez pendant toute l'élaboration la cale d'épaisseur **RE 0096**.

5. Faites une nouvelle construction secondaire.
6. Remplacez après la confection de la nouvelle prothèse les boutons-pression normaux utilisés **RE 0031** par les boutons-pression surdimensionnés utilisés pour la prise d'empreinte.

**Effets secondaires, avertissements et précautions**

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).

- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.