

REFAIRE UNE PROTHÈSE M3 AVEC PARTIES FEMELLES ENDOMMAGÉES

Si la prothèse doit être refaite en cas d'une construction primaire avec des parties femelles endommagées, la procédure ci-dessous doit être suivie.

CABINET DENTAIRE

1. Déterminez quel type de bouton-pression à utiliser pour la nouvelle prothèse, à l'aide de la jauge **H 30** (voir INFO 067).
2. Adaptez la forme du porte-empreinte individuel.
3. Complétez l'auxiliaire d'empreinte **H 14** avec le bouton-pression surdimensionné sélectionné et la cale d'épaisseur. Placez cette combinaison dans la partie femelle en bouche.
4. Cette combinaison doit être immobile dans la partie femelle. Activez le bouton-pression si nécessaire (voir INFO 059).
5. Éliminez les rétentions éventuelles en dessous de la partie femelle avec de la cire molle.
6. Prenez une empreinte de l'arcade complète avec un porte-empreinte individuel.

LABORATOIRE

1. Remplacez le bouton-pression utilisé pour l'empreinte par un bouton-pression normal **694 C**. Complétez l'auxiliaire d'empreinte **H 14** avec le bouton-pression normal **694 C** avec une cale d'épaisseur **694 B** et l'analogue de partie femelle **H 13**.
2. Placez cette combinaison dans l'empreinte.
3. Coulez un modèle de travail dans lequel se trouveront les analogues.
4. Faites une nouvelle construction secondaire.
5. Remplacez après la confection de la nouvelle prothèse les boutons-pression normaux **694 C** par les boutons-pression surdimensionnés utilisés pour la prise d'empreinte.

Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.

- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.