

ÉLABORATION DU PROFIL PRECI-HORIX PLASTICWAX

1. Prenez une empreinte de la situation en bouche. Modelez les couronnes ou les coiffes à tenon radiculaire ou placez sur les analogues d'implants les cylindres calcinables ou pour coulée de raccord.
2. Coupez le profil PLASTICWAX **1734** à la longueur nécessaire et positionnez-le avec la tige de paralléliseur **1708** entre les coiffes à tenon radiculaire, les couronnes ou les cylindres.
3. Le profil ne peut être déformé, refroidissez-le éventuellement à l'eau froide. Ajustez le côté basal en fonction du profil de la gencive et fixez la barre.
4. Si vous posez sur le profil une tige de coulée supplémentaire ou un évent, faites-le du côté basal de la barre.
5. Coulez la construction dans un alliage dur.
6. Terminez et polissez après la coulée comme d'habitude, mais avec précaution. Veillez à ne pas enlever trop de matériau.
7. Mettez la structure sur le modèle et placez les cavaliers de travail **1703**. Ajustez la longueur des cavaliers en fonction de la hauteur de la barre.
8. Éliminez les zones rétentives de la barre avec un matériau dur (ciment ou silicone). Veillez à ce que les cavaliers restent libres. Recouvrez également les zones libres de la partie supérieure de la barre.
9. Isolez.
10. Placez une logette **1706** au-dessus des cavaliers de travail **1703** (méthode recommandée) (voir INFO 009).
11. Terminez la prothèse comme d'habitude.
12. Découpez les cavaliers de travail après la polymérisation avec un bistouri et enlevez-les. Enclenchez les cavaliers définitifs en place à l'aide de l'auxiliaire d'insertion **1705**. Les cavaliers doivent s'enclencher de façon audible.
13. Utilisez éventuellement d'autres cavaliers s'il y a trop ou trop peu de rétention (voir INFO 016).

Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.