

REEMPLACER UNE PARTIE FEMELLE PRECI-CLIX

Tous les emballages PRECI-CLIX standard sont livrés avec des parties femelles jaunes **1231**.

Si la rétention de ces parties femelles ne donne pas entière satisfaction, elles peuvent être remplacées par des parties femelles blanches **1232** avec rétention réduite ou par des parties femelles rouges **1233** avec rétention accrue.

1. Pliez vers l'intérieur les segments de la partie femelle avec un instrument aigu (fraise affûtée).
2. Prenez un instrument qui s'insère dans la logette et chauffez-le. Enlevez la partie femelle avec un instrument aigu.
3. Placez la partie femelle désirée sur l'auxiliaire d'insertion **1222** et pressez-la dans la logette.
4. Contrôlez si la rétention désirée est obtenue.

Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.