

**CONVERSION DE REVAX TI EXTRA-CORONAIRE M 2
EN PRECI-CLIX**

Il peut être indiqué de transformer une prothèse partielle extra-coronaire traditionnelle lors de fractures répétitives de boutons-pression en construction PRECI-CLIX, car là ce sont les parties femelles qui les pièces élastiques.

Ceci peut se faire sans problème vu que **REVAX RE 0161 TI, RE 0175 TI, RE 0185 TI, RE 0195 TI** et **PRECI-CLIX TI** ont le diamètre interne du porte-partie femelle/mâle.

CABINET DENTAIRE

1. Enlevez la partie femelle et le **CEKA SITE (# CEKA SITE B)** du porte-partie femelle à l'aide d'une fraise diamantée cylindrique refroidie.
2. La cavité doit rester cylindrique.
3. Nettoyez et séchez la cavité.
4. Cimentez-y une partie mâle titane **1271 C** avec du **CEKA SITE**.
5. Enlevez, après durcissement, l'excédent du matériau.
6. Enlevez la combinaison de la partie mâle de la prothèse.
7. Adaptez l'intrados de la prothèse au diamètre de la nouvelle partie femelle (diamètre: 4,5 mm, hauteur: 3,5 mm) et percez la prothèse acrylique du côté lingual.
8. Pressez avec l'auxiliaire d'insertion **1222** une partie femelle **1234** dans la logette en titane **1235**.
9. Complétez la partie mâle avec la cale d'épaisseur **1251 B** et après avec la combinaison de partie femelle.
10. Mélangez une petite quantité de résine autopolymérisante pâteuse (de préférence d'une autre teinte que la base de la prothèse), appliquez-la dans la cavité prévue pour la partie femelle et posez la prothèse. Ne laissez pas le patient exercer des forces de mastication.
11. Enlevez, après durcissement, l'excédent de résine acrylique et la cale d'épaisseur.

Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.

- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.