

MODIFICATION D'UN PRECI-VERTIX AT EN PRECI-VERTIX

1. Remplissez le porte-empreinte de matériau d'empreinte et prenez une empreinte.
2. Positionnez l'analogue de partie mâle **1819** dans le porte-empreinte, avec l'ouverture de rétention orientée vers le haut.
3. Coulez le modèle en plâtre.
4. Coulez la logette en plastique **1808** dans l'alliage de votre choix.
5. Enlevez la partie femelle complète de la prothèse. Elle est scellée et se laisse facilement enlever à l'aide d'une fraise. Prévoyez suffisamment d'espace pour incorporer la nouvelle logette **1808**.
6. Raccourcissez la logette coulée, si nécessaire. Pour une meilleure adhésion, une rétention supplémentaire peut être créée sur l'extension de la logette.
7. Vous avez le choix de sceller la logette coulée avec **CEKA SITE** ou de la polymériser dans la résine.
8. Insérez la partie femelle **1802, 1805** ou **1806** dans la logette.

Effets secondaires, avertissements et précautions

- Les attachements sont destinés à un usage unique.
- Les produits sont non stériles.
- Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l'état clinique du patient change.
- L'adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d'hygiène convenables.
- L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée des attachements.
- La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement des dents (bruxisme).
- À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
- Ne pas chauffer les produits contenant du titane.
- Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.
- Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.