

TECNICA DI LAVORAZIONE DEL PERMA-RET

1. Stabilite il punto in cui deve essere applicato il filo PERMA-RET **1602**.
2. Posizionate la fresa **1606** nel manipolo. Praticate nel dente un foro della profondità di ca. 3 mm.
3. Fissate il filo ritentivo nel mandrino per filo **1604**.
4. Avvitare il filo nel foro.
5. Tagliate il filo con una tronchese oppure con un disco alla lunghezza desiderata (ca. 4 mm).
6. Piegate l'estremità del filo o formate un cappio. Esso offre quindi un'ottima ritenzione per la resina.

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura prematura degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.