

## SOSTITUIRE UN CAVALIERE PRECI-HORIX

In tutte le confezioni PRECI-HORIX sono forniti i cavalieri gialli standard **1802**.

Se la ritenzione del cavaliere non corrisponde alle esigenze, è possibile sostituirlo con un cavaliere bianco **1805** con ritenzione inferiore o con un cavaliere rosso **1806** con ritenzione maggiore.

1. Tagliate con un bisturi il cavaliere al centro e rimuovetelo dalla protesi.
2. Mettete il cavaliere con la ritenzione desiderata sull'accessorio per l'inserzione **1705** e spingetelo in posizione.
3. Controllate se è stata ottenuta la ritenzione desiderata.

### Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura prematura degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.