

RIFACIMENTO DI UNA PROTESI CON PRECI-HORIX

1. Rilevate un'impronta di partenza completa. Misurate la lunghezza della barra in bocca del paziente.
2. Accorciate l'analogo del preformato **1707** a questa lunghezza e praticate delle ritenzioni per il modello di gesso (con un disco di corindone o diamantato).
3. Spingete l'analogo del preformato nel punto corrispondente dell'impronta e fabbricate un modello di gesso duro o in resina epossidica.
4. Applicare il mantentore di spazio **1703** sull'analogo del preformato e chiudete il sottosquadro rimanente con un materiale resistente (gesso, silicone oppure cemento).
5. Munite, se necessario, i mantentori di spazio con l'alloggiamento **1706** ed ultimate la protesi come di consueto.
6. Rimuovete i mantentori di spazio con uno strumento tagliente.
7. Spingete i cavalieri desiderati **1802/1805/1806** tramite l'accessorio per l'inserzione **1705** allegato nei punti previsti (vedi INFO 016).

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura prematura degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.