

## SOSTITUIRE UNA MATRICE PRECI-VERTIX

In tutte le confezioni PRECI-VERTIX **1801** e **1811** sono fornite le matrici gialle standard **1802**.

Se la frizione della matrice non corrisponde alle esigenze, è possibile sostituirla con una matrice bianca **1805** con frizione inferiore o con una matrice rossa **1806** con frizione maggiore.

1. Tagliate con un bisturi la matrice al centro e rimuovetela dalla protesi.
2. Mettete la matrice con la frizione desiderata sull'accessorio per l'inserzione **1804** allegato e spingetela in posizione.
3. Controllate se è stata ottenuta la frizione desiderata.

### Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura prematura degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.