

TECNICA DI LAVORAZIONE DEL PREFORMATO PLASTICWAX

- Il preformato PLASTICWAX permette una modellazione rapida e precisa dei collegamenti a barra.
- Il preformato PLASTICWAX è una combinazione di cera e resina.
- Il preformato PLASTICWAX è calcinabile fonde senza residui.
- Il preformato PLASTICWAX può essere piegato. Nonostante ciò si mantengono le proprietà del preformato. Non ha memoria.
- Il preformato PLASTICWAX è disponibile come:

1. preformato conico (8°, lunghezza: 60 mm) come profilo bloccante	IMP-CK-014	4 pezzi/confezione
2. preformato tondo (Ø 1,8 mm, lunghezza: 60 mm) da usare con i cavalieri PRECI-CLIP 1105 e 1106	1108/B	4 pezzi/confezione
3. preformato PRECI-HORIX (Ø 1,8 mm, altezza: 4 mm, lunghezza: 60 mm) da usare con i cavalieri in plastica PRECI-HORIX 1802 ed i cavalieri PRECI-CLIP 1105 e 1106	1734	4 pezzi/confezione
4. preformato PRECI-BAR STANDARD a forma di U (Ø 2,2 mm, altezza: 3 mm, lunghezza: 60 mm) da usare con i cavalieri PRECI-BAR 1100/H/MR/OR e 1100/H/MR/IN	1001/B	4 pezzi/confezione
5. preformato PRECI-BAR MINI ovale (Ø 1,6 mm, altezza: 2,3 mm, lunghezza: 60 mm) da usare con i cavalieri PRECI-BAR 1102/H/MR/OR e 1102/H/MR/IN	1002/B	4 pezzi/confezione

1. Piegate il preformato in acqua calda. Attenzione: le zone del preformato in cui sono previsti i cavalieri non devono essere piegati!
2. Solidificate il preformato in acqua fredda.
3. Tagliate il preformato alla lunghezza desiderata con un bisturi riscaldato.
4. Fissate il preformato con della cera agli abutments.

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura prematura degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.