

**RIBASARE O RIADATTARE UNA PROTESI CON PRECI-VERTIX**

1. Applicare il materiale d'impronta sul lato gengivale della protesi e rilevare un'impronta.
2. Rimuovete le matrici con un bisturi dalla protesi.
3. Riempite le camicette metalliche completamente con silicone.
4. Fate un modello di gesso duro.
5. Ribasate come di consueto. Utilizzate un attrezzo per ribasature.
6. Togliete il silicone dalle camicette metalliche ed inserite delle matrici nuove (vedi INFO 026).

**Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni**

- Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.
- I prodotti sono non sterili.
- Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.
- L'adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.
- L'uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l'usura prematura degli attacchi.
- La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come digrignamento dentale (bruxismo).
- Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati nel file del paziente.
- Non riscaldare prodotti che contengono titanio.
- Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.
- Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.